

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Allewyn Non-Adhesive Compression IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 46609
PREV BSC:	
DATE:	11.12.2013
REVISION:	02

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1539		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	JW



# ALLEVYN<sup>®</sup> COMPRESSION

## Повязка из полиуретановой пены

Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки.

### Описание

ALLEVYN Compression – это раневая повязка, которая содержит высокоабсорбирующий материал, включенный в полиуретановый матрикс, покрытый водоотталкивающей пленкой.

### Механизм действия

Повязка ALLEVYN Compression поддерживает оптимальную для заживления влажность раневой среды. Повязку легко накладывать и удалять. Гибкость повязки, позволяет применять её на всех анатомических частях тела.

### Показания к применению

Повязки ALLEVYN Compression используется для лечения поверхностных ран с умеренной и высокой степенью экссудации, например, венозных трофических язв, диабетических язв, ожогов первой и второй степени, пролежней I-IV степени. Лечение должно проходить под наблюдением врача.

### Инструкция по применению

- 1 Очистите рану согласно стандартной процедуре.
- 2 Выберите повязку подходящего размера, чтобы она перекрывала края раны не менее чем на 2 см. Повязку ALLEVYN Compression можно выкраивать для аппликации на раны в области пяток, локтей и других частей тела сложного рельефа.
- 3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного экссудата. Удалите волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегла к раневой поверхности.
- 4 Наложите повязку на рану самоклеющейся стороной, чтобы она хорошо прилегла к раневой поверхности.
- 5 Повязка ALLEVYN Compression нуждается в дополнительной фиксации, поэтому рекомендуется использовать бинты, в частности, компрессионные.

### Частота смены повязки

Частота смены повязки зависит от количества раневого экссудата. Смените повязку при увеличении в объеме вторичной повязки или экссудат просачивается наружу. Интервал между сменами повязки обычно составляет от одного до нескольких дней, но не реже одного раза в неделю. В начальных фазах лечения раны ревизия повязки должна производиться чаще.

### Удаление повязки

Для удаления повязки ALLEVYN Compression приподнимите ее за один из уголков и затем потяните на себя.

### Сочетание с другими методами лечения

ALLEVYN Compression можно использовать в комбинации с другими методами лечения, в частности, с компрессионной терапией под наблюдением специалиста. При компрессионной терапии выкраивайте повязку по размеру раны.

### Меры предосторожности

Не применяйте повязки ALLEVYN Compression вместе с такими окислителями, как растворы гипохлорита или перекиси водорода. Повязка сохраняет стерильность, пока не нарушена целостность упаковки. Повязка ALLEVYN Compression предназначена для однократного использования. Применение повязки для лечения ран другого пациента может вызвать перекрестное заражение или развитие инфекции. Вскрытие упаковки нарушает стерильность повязки, поэтому все неиспользованные повязки должны быть утилизированы.

### Противопоказания

Не используйте на ранах с открытыми мышцами, костями или сухожилиями. Не применяйте при ожогах третьей степени. При подозрении на развитие инфекции (гиперемия кожи или гнойный экссудат) проконсультируйтесь с лечащим врачом. Инфицированные раны необходимо ежедневно осматривать и лечить соответствующим образом.

Ассортимент Код	Размер	Штук в упаковке
66047581	5см x 6см / 2" x 23/8"	10
66047583	10см x 10см / 4" x 4"	5
66047584	15см x 20см / 6" x 8"	3

\* - дюймы

**СТЕРИЛЬНО R** Хранить в сухом месте при температуре не выше <math>25^{\circ}\text{C}</math> (77°F). Для однократного применения. Для ран со средней и высокой степенью экссудации. Радиационный метод стерилизации. Внимание! Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Беречь от солнечных лучей. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки.

### Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN, Англия  
Торговые марки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013



0086

46609