

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Allewyn Non-Adhesive Heel IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 46607
PREV BSC:	
DATE:	11.12.2013
REVISION:	02

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1537		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	JW



# ALLEVYN<sup>®</sup> NON-ADHESIVE

## Неадгезивная губчатая полиуретановая повязка

### Описание

Повязка ALLEVYN Non-Adhesive сочетает абсорбирующий губчатый слой расположенный между неприлипающим перфорированным внутренним слоем, непосредственно контактирующим с раной, и наружной полупроницаемой пленкой.

### Механизм действия

Повязка ALLEVYN Non-Adhesive способствует поддержанию оптимальной влажной среды в области раны среды. Повязку легко накладывать и удалять. Отсутствие адгезивного компонента позволяет применять повязку на чувствительной коже.

### Показания к применению

Ведение неглубоких гранулирующих ран, заживающих вторичным натяжением, хронических и острых экссудирующих ран, как глубоких, так и поверхностных, таких как пролежни, трофические венозные язвы, инфицированные раны, диабетические язвы стоп, малигнизированные язвы, хирургические раны, ожоги первой и второй степени, донорские участки при пересадке кожи и грибковые язвы. В некротических и гнойно-фибринозных ранах повязка ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться совместно с гелем INTRASITE<sup>®</sup>. Повязка ALLEVYN Heel способствует снижению давления на рану используется совместно с антипрессорными устройствами в рамках протокола лечения пролежней.

### Меры предосторожности

Не применяйте повязки ALLEVYN Non-Adhesive вместе с такими окислителями, как растворы гипохлорита (например, EUSOL (ЗУСОЛ)) или перекиси водорода, поскольку они могут вызывать распад абсорбирующего полиуретанового компонента повязки. Гиперемия кожи вокруг раны после применения ALLEVYN Non-Adhesive наблюдалась редко. В одних случаях это связано с раздражением чувствительной кожи, в других причиной может стать продолжительный контакт раневого экссудата со здоровой кожей. Были зафиксированы редкие случаи гиперчувствительности пациентов к повязке. Запрещается использовать ALLEVYN Heel для лечения пролежней без антипрессорных устройств. ALLEVYN Heel – это продукт для однократного

использования. Применение повязки для лечения ран другого пациента может вызвать перекрёстное заражение или развитие инфекции. Вскрытие упаковки нарушает стерильность повязки, поэтому нельзя откладывать наложение вскрытой повязки на другой день.

### Инструкция по применению

- 1 Очистите рану в соответствии с клиническими правилами.
- 2 Выберите повязку подходящего размера.
- 3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного экссудата. Удалите волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегала к раневой поверхности.
- 4 Наложите ALLEVYN Non-Adhesive белой поверхностью на рану и укрепите фиксирующей пленкой (например, OPSITE<sup>®</sup> Flexifix), пластырем или бинтом. ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться для лечения венозных трофических язв совместно с компрессионной терапией.
- 5 При необходимости ALLEVYN Non-Adhesive можно обрезать для придания ей оптимальной формы на частях тела сложного рельефа.
- 6 ALLEVYN Non-Adhesive можно использовать в сочетании с другими методами лечения, например, с компрессионной терапией, под наблюдением врача. При компрессионной терапии повязку необходимо обрезать под размер раны.

### Частота смены повязки

В начальных фазах лечения раны ревизия повязки ALLEVYN Non-Adhesive должна производиться часто.

Повязку можно оставлять на месте до 7 дней или до тех пор, пока видимая граница экссудата не достигнет 1,5 см от края повязки. При этом необходимо соблюдать правила для лечения подобных ран. Водонепроницаемая пленка на наружной поверхности повязки препятствует бактериальной контаминации раны.

ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться при лечении инфицированных ран под наблюдением врача.

### Удаление повязки

Для удаления повязки снимите фиксирующую повязку или бинт и аккуратно извлеките ALLEVYN Non-Adhesive из раны.

### Ассортимент

Код	Размер	Штук в упаковке
66007643	5см x 5см / 2" x 2"	10
66007637	10см x 10см / 4" x 4"	10
66007335	10см x 20см / 4" x 8"	10
66000093	15см x 15см / 6" x 6"	10
66007638	20см x 20см / 8" x 8"	10
66000663	40см x 70см / 15½" x 27½"	2
66007630	Пятка	5
66000773	Пятка	10
	*- дюймы	

**СТЕРИЛЬНО R** Хранить в сухом месте при температуре не выше <25°C (77°F). Предназначено только для одноразового использования. Для ран со средней и высокой степенью экссудации. Внимание! Беречь от солнечных лучей. Радиационный метод стерилизации. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

### Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, Англия  
Торговые марки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013



0086

46607