

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Intrasite Gel IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55059
PREV BSC:	
DATE:	22/12/2014
REVISION:	03

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1909		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB


(RU)

 smith&nephew

INTRASITE[®] GEL

Гидрогелевая повязка для ран

СТЕРИЛЬНО 

 Для одноразового использования. Стерилизовано паром. Не используйте содержимое, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (5–25 °C). Беречь от солнечных лучей.

Описание

Гель INTRASITE[®] — это прозрачный аморфный гидрогель, содержащий полимер модифицированной карбоксиметилцеллюлозы, пропиленгликоль и воду. Поставляется стерильным. Одноразовая упаковка содержит одну дозу для заполнения раны.

Механизм действия

Гель INTRASITE способствует естественной санации раны посредством аутолиза, обеспечивая щадящую регидратацию некротических тканей. Он также ослабляет и поглощает некротические массы и экссудат. Гель INTRASITE обеспечивает влажную среду для заживления ран. Гель не обладает клеящей способностью и не повреждает жизнеспособные ткани и кожу вокруг раны.

Показания

Гель INTRASITE назначается для удаления нежизнеспособных тканей из неглубоких и глубоких ран, таких как пролежни, язвы на ногах, язвы диабетической стопы, злокачественные раны, ожоги, хирургические раны, ожоги паром, рваные раны, ссадины, ампутации и некротические язвы. Также используется для лечения гранулирующих полостных ран, нарушенного кожного покрова и радиационных ожогов.

Противопоказания

Не использовать, если существует известная чувствительность к гелю INTRASITE или какому-либо из его компонентов.

Меры предосторожности

Убедитесь, что все остатки геля удалены перед лучевой терапией. Если появляются признаки раздражения или гиперчувствительности, прекратите использование. Гель INTRASITE должен использоваться с осторожностью в области глаз и в глубоких ранах с узким входным отверстием (например, фистулах), а также в полостях тела, где удаление геля может быть затруднено. Гель INTRASITE предназначен только для наружного использования и не должен приниматься внутрь. ОПАСНОСТЬ АСФИКСИИ — примите соответствующие меры при утилизации защитного колпачка.

Не принимать внутрь. Не использовать на потрескавшихся сосках. Гель INTRASITE является продуктом для одноразового использования. В случае использования более чем для одного пациента может возникнуть перекрестное заражение или инфекция. Неиспользованный гель нельзя сохранять для последующего использования.

Инструкция по применению

Если продукт применяется на инфицированных ранах, инфекция должна лечиться в соответствии с местным клиническим протоколом.

1. Подготовьте рану: Снимите вторичную повязку. Промойте рану стерильным физиологическим раствором для очистки дна раны.
2. Подготовьте упаковку: Снимите защитный колпачок с наконечника. Протрите отламывающийся кончик и наконечник соответствующим антисептическим тампоном. Отломите рельефный кончик наконечника.
3. Нанесите гель INTRASITE на рану. Не касаясь наконечником поверхности раны, осторожно нажмите на емкость упаковки, чтобы выдавить гель в рану, избегая попадания на кожу вокруг. Распределите гель INTRASITE по поверхности раны до толщины примерно 5 мм (0,2 дюйма). Утилизируйте неиспользованный гель.
4. Наложите повязку на рану: Закройте рану вторичной повязкой по выбору, напр.: при некротических ранах

ПОВЯЗКА: OPSITE[®] FLEXIGRID[®]
 При фибриновых ранах: ALLEVYN[®]/MELOLIN[®]
 При гранулирующих ранах: ALLEVYN/MELOLIN/
 OPSITE FLEXIGRID
 При зловонных ранах: CARBONET[®]

5. Удаление геля INTRASITE: Гель INTRASITE может удаляться из раны путем промывания стерильным физиологическим раствором. Если гель INTRASITE становится трудно удалить, пропитайте область стерильной водой или физиологическим раствором, чтобы облегчить удаление. На некротических и фибриновых ранах рекомендуется менять повязку как минимум раз в три дня. На чистых гранулированных ранах частота смены повязок зависит от клинического состояния раны и количества экссудата.

Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
7308	8 г	10 шт. в коробке
7311	15 г	10 шт. в коробке
7313	25 г	10 шт. в коробке
66800241	25 г	3 шт. в коробке

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England
 *Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2014
 www.smith-nephew.com

55059



0086