

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Cica-Care IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55069
PREV BSC:	
DATE:	29/01/2015
REVISION:	05 - FINAL

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1908		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	SG

(RU)

 smith&nephew

CICA-CARE[®]

Повязка в виде пластинки из силиконового геля



Не используйте, если упаковка открыта или повреждена.

Описание

Повязка в виде пластинки из силиконового геля CICA-CARE[®] — это мягкий самоклеющийся полугерметичная пластинка, изготовленная из силикона медицинского класса и усиленная силиконовой мембраной.

Показания

CICA-CARE предназначен для временного использования:

1. при лечении имеющихся и новых гипертрофических и келоидных рубцов;
2. в качестве профилактического лечения вшитых хирургических ран, чтобы помочь предотвратить появление гипертрофированных и келоидных рубцов.

Противопоказания

Не используйте для пациентов с осложняющими медицинскими факторами, которые могут не позволить им правильно использовать гелевый лист. Не используйте для пациентов с дерматологическими заболеваниями (напр., псориаз и акне). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ОТКРЫТЫХ РАНАХ или в местах, где целостность кожи нарушена.

Меры предосторожности

У некоторых пациентов наблюдалась сыпь на покрытой коже в месте применения. Это могло быть связано с недостаточным уровнем гигиены, либо с применением слишком большого внешнего давления при использовании повязки. В случае возникновения сыпи сократите время терапии CICA-CARE: 12 часов с гелевой повязкой, 12 часов – без. Если сыпь не проходит, прекратите использование и обратитесь к врачу. На хирургических разрезах используйте CICA-CARE только после снятия швов и полного заживления места операции. Тщательно следуйте процедурам акклиматизации и мытья. Использование CICA-CARE для маленьких детей не рекомендуется, за исключением использования в сочетании с соответствующей вторичной фиксирующей повязкой. Не наносите мази или кремы под гелевый лист, поскольку они могут препятствовать действию продукта.

Осложнения и побочные эффекты

Риски и осложнения при использовании CICA-CARE:

1. Поверхностная мацерация кожи.
2. Сыпь.
3. Зуд.

Инструкция по применению

1. Очистите и высушите область рубца и окружающую кожу.
2. Откройте упаковку и извлеките лист CICA-CARE с находящейся на ней подкладкой.
3. Отрежьте часть, размером превышающим рубец с небольшим

перекрытием окружающей кожи (А). Для больших рубцов используйте несколько пластинок рядом друг с другом. Чтобы облегчить снятие, убедитесь, что на отрезанной части есть язычок для снятия на подложке.

4. Аккуратно снимите подложку и, не растягивая, наложите клейкой стороной на рубец (B, C).
5. CICA-CARE является самоклеющимся, но также может фиксироваться с помощью соответствующего слегка эластичного бинта или пластыря, например, Opsite[®] Flexifix или PRIMAFIX[®]. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать слишком тесного контакта с рубцом, поскольку это может привести к раздражению рубца и окружающей области.
6. Храните неиспользованную часть в оригинальной упаковке в сухом месте (<25 °C).

Рекомендуемый уход

1. Мойте CICA-CARE два раза в день в щадящем немасляном мыльном растворе и прополаскивайте чистой теплой водой (D). Промокните и снова наложите на сухой очищенный рубец. Не используйте моющие средства, поскольку это может привести к раздражению кожи. Не используйте бумажные изделия (напр., кухонные полотенца) для высушивания CICA-CARE, поскольку они могут приклеиться к гелевому листу.
ПРИМЕЧАНИЕ. В теплую погоду или во время физической активности, когда может возникнуть потоотделение, необходимо чаще мыть CICA-CARE для обеспечения комфорта и сохранения оптимального контакта между CICA-CARE и кожей.
2. Перед применением убедитесь, что рубец и окружающая кожа чистые и сухие.
3. В течение терапии CICA-CARE следует использовать как минимум 12 часов в сутки. По возможности CICA-CARE следует применять в течение 24 часов с перерывами для мытья.
4. Для лучшей акклиматизации кожи начните с применения CICA-CARE в течение 4 часов в день в первые два дня, 8 часов в день в течение следующих двух дней, а затем увеличивайте использование на два часа в день, пока не достигнете оптимальных 24 часов терапии.
5. Если CICA-CARE начнет терять свои свойства или очистка станет затруднительной, замените повязку. Обычно это происходит через 14–28 дней. Если рубец расположен на суставе или в месте, подверженном постоянному трению, этот срок может уменьшиться. Общее время терапии должно быть в пределах от 2 до 4 месяцев.

Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
66250707	12 см x 15 см	10 шт. в коробке
66250706	12 см x 15 см	1 шт. в коробке
66250705	12 см x 6 см	40 шт. в коробке
66250704	12 см x 6 см	1 шт. в коробке

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England
 *Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 01/2015
 www.cica-care.com

55069

