

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Cutinova Hydro IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55050
PREV BSC:	
DATE:	11/03/2015
REVISION:	04 - FINAL

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1907		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	SG

(RU)

smith&nephew

# CUTINOVA<sup>®</sup> HYDRO

Гидроселективная повязка для ран

**СТЕРИЛЬНО R** 

Стерильно. Для одноразового использования. Стерилизовано гамма-излучением. Стерильность сохраняется, пока упаковка остается запечатанной и неповрежденной. Хранить в сухом месте (<25 °C).

**Описание**  
CUTINOVA Hydro — это гидроселективная самоклеящаяся повязка для лечения экссудующих ран, окруженных неповрежденной кожей.

**Механизм действия**  
CUTINOVA Hydro селективно поглощает по большей части воду из экссудата раны, способствуя сохранению собственных факторов роста и белков пациента в ране. Известно, что факторы роста и другие натуральные белки необходимы для заживления ран.

CUTINOVA Hydro содержит материал с высокой абсорбирующей способностью, помещенный в самоклеящуюся полиуретановую матрицу.

Повязка покрыта водонепроницаемой полиуретановой пленкой, проницаемой для кислорода и водяного пара.

Такая структура позволяет повязке очищать рану и поддерживать в ней влажную среду, способствующую физиологическому заживлению. Гибкость позволяет использовать повязку на всех частях тела.

**Показания**  
CUTINOVA Hydro может использоваться по рекомендации медицинского работника для экссудующих ран, заживающих вторичным натяжением, таких как:

- язвы на ногах;
- пролежни;
- поверхностные ожоги и ожоги до фасциального слоя;
- язвы диабетической стопы;
- может использоваться в качестве вторичной повязки на полостных ранах, если окружающая кожа не повреждена и находится в нормальном состоянии.

**Противопоказания**

- Не используйте при ранах с открытыми сухожилиями или костями, где существует риск высыхания.
- Не используйте при ранах, кожа вокруг которых повреждена или очень чувствительна.
- В случае подозрения на инфекцию обратитесь к медицинскому работнику. Инфицированные раны должны ежедневно контролироваться и обрабатываться соответствующим образом.

**Меры предосторожности**

- Избегайте использования окислителей, например, растворов перекиси водорода и гипохлорита, с CUTINOVA Hydro.
- CUTINOVA Hydro не будет эффективной на ранах, покрытых черным некротическим струпом, если не используется гидрогель (напр., INTRASITE<sup>®</sup> Gel) или если есть экссудат.

**Инструкция по применению**

1. Сначала очистите рану путем ирригации нормальным физиологическим раствором или другим соответствующим раствором. Снимите с повязки защитную бумагу.
2. Убедитесь, что окружающая кожа чистая и сухая. Наложите повязку на очищенную рану, перекрывая края раны как минимум на 2 см.
3. CUTINOVA Hydro не нуждается в дополнительной фиксации, поскольку является самоклеящейся. Тем не менее, в зависимости от местоположения раны (например, область высокого трения) рекомендуется дополнительная фиксация, чтобы предотвратить отклеивание краев повязки.
4. Частота смены повязки зависит от уровня экссудации раны. Меняйте повязку, когда по краям повязки образуется беловатый пузырь (самое позднее – когда возникает протекание). Повязка должна меняться как минимум один раз в неделю.
5. CUTINOVA Hydro легко меняется – ее можно полностью снять с раны с минимальными болевыми ощущениями на ране. Очистите рану в соответствии с требованиями (см. 1) перед наложением новой повязки.

**ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ**

**Сочетание с другим лечением:**  
Cutinova Hydro может использоваться под наблюдением медицинского работника в сочетании с другими методами лечения, например, компрессионной терапией.

**Информация о безопасности**  
Храните повязку в недоступном для детей месте. Не выбрасывайте повязку в унитаз.

**Характеристики**

**Гидроселективная.**  
Поглощает главным образом воду, а не факторы роста и другие натуральные белки.

**Прозрачная.**  
Позволяет контролировать состояние раны без снятия повязки.

**Чистая.**  
Абсорбирует жидкость из раны, не превращаясь в гель.

**Нет запаха геля.**  
Полиуретановая основа CUTINOVA Hydro не взаимодействует с жидкостью в ране и не образует гель.

**Типы упаковок и размеры**

Индивидуальные стерильные упаковки.

66047441	5 см x 6 см	10 шт. в коробке
66047443	10 см x 10 см	5 шт. в коробке
66047445	15 см x 20 см	3 шт. в коробке

**Производитель**

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England  
\*Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выпуска 12/2014  
www.smith-nephew.com

55050

**CE**  
0086