

SMITH & NEPHEW RECORD		STRAWBERRY RECORD			
ITEM:	Leukostrip IFU (Russian)	JOB NO:	1949		
CODE:	N/A	DIMS:	90 x 210mm		
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55750	COLOURS:	■ Black		
PREV BSC:	N/A	Match to coated stock PMS			
DATE:	19/03/2015	ARTWORK	MP	CHECKED	SG
REVISION:	02 - FINAL				

(RU)




smith&nephew

# LEUKOSTRIP<sup>◇</sup>

Полоски для закрытия ран при небольших порезах

СТЕРИЛЬНО R ②

1. Очистите кожу как минимум на 5 см вокруг пореза водой, спиртом или физиологическим раствором, высушите ее и убедитесь, что из пореза удалены все загрязнения.
2. Откройте конверт, извлеките карточку, разломите по перфорированной линии и оторвите полоски.
3. Всегда начинайте накладывать полоски с середины раны. Точно соедините края кожи пальцами или пинцетом.
4. Завершите закрытие раны, наложив дополнительные полоски на расстоянии приблизительно 2–3 мм друг от друга для обеспечения дренажа.

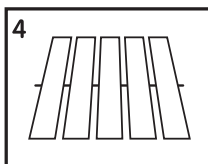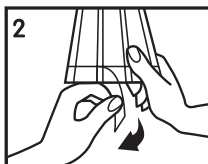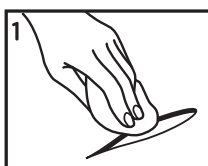

## Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
66002876	4 мм x 38 мм	50 шт. в коробке
66002878	6,4 мм x 76 мм	50 шт. в коробке
66002879	6,4 мм x 102 мм	50 шт. в коробке
66002880	13 мм x 102 мм	50 шт. в коробке
66002881	26 мм x 102 мм	25 шт. в коробке

## Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England  
 Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 03/2015  
 www.smith-nephew.com

55750

CE

0086