

Срок годности инфузионных наборов MiniMed Sure-T, которые были произведены до изменений, оканчивается в апреле 2019 года или раньше.

Если у Вас имеются инфузионные наборы, которые были произведены до изменений, и Вы хотите заменить их, пожалуйста, свяжитесь с линией поддержки Медтроник по телефону 8 800 200 76 36.

Если Вы хотите продолжить использование инфузионных наборов, которые были произведены до изменений в производственном процессе, внимательно просмотрите руководство пользователя, которое прилагается к набору с инфузионными системами, а также следующую информацию:

Перед использованием:

- Аккуратно снимите защитный колпачок с иглы перед установкой инфузионного набора. При снятии защитного колпачка не скручивайте и не сгибайте его.
- Не используйте инфузионный набор, если игла согнута или повреждена.
- Не сгибайте иглу перед установкой.
- Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом по поводу места установки инфузионного набора.

Во время использования:

- Как всегда, необходимо регулярно проверять уровень глюкозы крови при помощи глюкометра.

После использования:

- Осторожно удалите инфузионный набор после использования, чтобы избежать загиба иглы.
- Перед тем, как выбросить инфузионный набор, убедитесь, что игла присутствует на использованном наборе.
- Пожалуйста, свяжитесь с Вашим лечащим врачом, если у Вас есть подозрения, что игла сломалась.
- Продолжайте следить за уровнем глюкозы крови.

Если у Вас есть какие-либо вопросы по продукции компании, пожалуйста, обратитесь **на круглосуточную линию поддержки Медтроник по телефону 8 800 200 76 36.** Высокое качество продукции и услуг является приоритетом для компании Медтроник. Мы высоко ценим Ваше время и внимание к этим уведомлениям и благодарим Вас за дальнейшее доверие к Медтроник.

С уважением,
Антон Мосягин,
Руководитель направления Диабет,
Россия

